

	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Documento Nº: FTP-012
	EPIFLEX – SR	Revisão Nº: 02
		Data: 12 Set. 2018
		Pág.: 1 de 2

1. CARACTERÍSTICAS

O Epiflex é injetado termoplásticamente em polipropileno ou polietileno com pigmentação em diversas cores.

2. MEDIDAS / CALIBRES

Modelo disponível nas cores: verde, azul, amarelo e transparente.



3. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Epiflex-SR:

- Embalado de forma in bulk em saco plástico personalizado de polipropileno medindo 15x24x0,11mm, contendo 100 unidades.
- A embalagem para transporte consiste em uma caixa de papelão na cor parda **sem descrição**, onde os epiflex selados em sacos são acomodadas dentro da caixa, cada caixa deverá conter a *quantidade de 1.600 unidades*, a mesma deverá ser fechada e lacrada com fita adesiva de polipropileno

4. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

Não estéril.

5. INDICAÇÃO

O Epiflex SR é um dispositivo de segurança simples, de fácil manuseio e muito seguro. Auxilia no manuseio de agulhas hipodérmicas e protege o profissional de acidentes com picadas de agulhas, fabricado conforme orientações da NR32.

Nota: O Epiflex é utilizado em agulhas hipodérmicas, mas é considerado um acessório e por isso não possui registro na ANVISA.

6. INSTRUÇÕES DE USO

1. Segure o EPIFLEX na base antiderrapante, escolha o orifício que melhor encaixa ao protetor da agulha e empurre até prender o protetor com firmeza.
2. Após o encaixe, retire o protetor da agulha com um movimento reto e para frente. Prenda o EPIFLEX no jaleco ou simplesmente o solte se tiver preso ao seu pescoço por um cordão ou elástico.
3. Após o uso da agulha, segure o EPIFLEX na base antiderrapante e proteja a agulha com o protetor até ouvir um “click” que indica que está travado e não oferece mais risco.
4. Para descartar a agulha e a seringa, apoie a ponta do protetor em uma superfície rígida, pressione o EPIFLEX para baixo, de maneira que deslize pelo protetor e fique frouxo. Descarte o material em local apropriado.

7. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade do produto antes do uso.

8. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto a temperatura ambiente em local seco e limpo.

9. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE LOTE

9.1. **Identificação:** é realizado por meio da fixação de uma etiqueta auto adesiva na caixa de embalagem, onde consta as informações sobre Lote (informação necessária para rastrear internamente o produto) e Fabricação (informa o mês e ano de fabricação do produto).

9.2. **Controle de Lote:** para cada forma de apresentação o produto e aberto um Lote de modo que possamos rastrea-lo desde a sua origem, o tamanho do lote varia conforme necessidade da empresa e ao pedido do cliente,

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**

Documento Nº: FTP-012

EPIFLEX – SR

Revisão Nº: 02

Data: 12 Set. 2018

Pág.: 2 de 2

Lote (sequencia composta por número e letra):	Fabricação (sequencia composta por número e letra):
<p>0000 X. 4</p> <p>→ Numeração Sequencial de até 04 dígitos</p> <p>→ Letra de identificação do ano de fabricação</p> <p>→ Número que corresponde ao setor</p>	<p>Mês Ano</p> <p>→ As três primeiras letras do mês de fabricação</p> <p>→ Os dois últimos dígitos do ano de fabricação</p>

10. CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

11. INTERAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

12. FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores
CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil
CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2
Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416
E-mail: vendas@seringasr.com.br / qualidade@seringasr.com.br