

SERINGA CATETER

1. CARACTERÍSTICAS

A seringa cateter montada constitui dos seguintes componentes, com as respectivas matérias-primas básicas:

1. **PISTÃO:** Componente injetado em borracha termoplástica ou borracha vulcanizada, ambas **isentas de látex**.
2. **CILINDRO:** Componente injetado termoplasticamente em Polipropileno PP natural, transparente.
3. **HASTE:** Componente injetado termoplasticamente em Polipropileno PP natural ou Polietileno PE.
4. **CAP ou Tampa do bico da seringa:** Componente injetado termoplasticamente em Polipropileno PP natural, adicionado de Pigmento, de forma a apresentar a coloração azul translúcido.

Nota: Produto fabricado conforme requisitos normativos e legais aplicáveis.

2. MEDIDAS / CALIBRES

Seringa 60mL Cateter

3. REGISTROS MS-ANVISA

- Seringa cateter: **80026180038**

4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Estéril - embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com código de barras.

5. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

Óxido de Etileno.

6. INDICAÇÃO

Seringa é indicada para: **aspiração e administração de volumes líquidos, soluções e alimentação oral/enteral.**

7. INSTRUÇÕES DE USO

1. Verificar a integridade do produto antes do uso.
2. Destacar a unidade do produto da cartela.
3. Abrir a embalagem através da técnica asséptica (sempre através da pétala).
4. Realizar a lubrificação do cilindro, movimentando o êmbolo suavemente.
5. Aspirar a solução/dieta enteral com a seringa e conectar a seringa na sonda;
6. Lentamente, empurrar o êmbolo da seringa, para que aos poucos a dieta seja infundida.
7. Repetir a operação até o término da dieta.
8. Aspirar 20 mL de água com a seringa e injetar na sonda para limpá-la internamente.
9. Tampar a sonda e descartar a seringa e a tampa em recipiente apropriado e identificado para esse fim.

8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Produto de uso único. Descartar após o uso.
- O descarte do produto deve seguir os critérios de biossegurança.
- Verifique a integridade da embalagem, não utilize se a mesma estiver violada ou fora do prazo de validade. Abrir a embalagem somente no momento de sua utilização, em condições assépticas. Em caso de dúvidas quanto à integridade da embalagem externa, não utilizar o produto.



 SALDANHA RODRIGUES LTDA. Qualidade e tecnologia em suas mãos.	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Documento N°: FTP- 015
	SERINGA CATETER	Revisão N°: 02
		Data: 22 Mar. 2019
		Pág.: 2 de 2

9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, a temperatura ambiente em local seco e limpo.

10. CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

11. INTERAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

12. FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores
CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil
CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2
Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416
E-mail: vendas@seringasr.com.br / qualidade@seringasr.com.br