 SALDANHA RODRIGUES LTDA. Qualidade e tecnologia em suas mãos.	Ficha Técnica do Produto	Documento N°: FTP-020
	CAP (TAMPAS)	Revisão N°: 02
		Data: 16 Abr. 2020
		Pág.: 1 de 2

MODELO	MARCA	VALIDADE	MS - ANVISA
Cap Luer Universal	SR – Saldanha Rodrigues	5 Anos	80026180044
Protetor para Bico Cateter			

1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

1.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O cap pode ser utilizado para vedar conexão do tipo macho (Luer Slip ou Luer Lock), podendo apresentar-se estéril ou não e em embalagem individual ou coletiva, pode ser translúcido ou pigmentado.

1.2 COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- a) Cap: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), atóxico, inerte e apirogênico. Pode ser adicionado de pigmento azul.
- Cap para bico seringa oral/ enteral: adicionado de pigmento azul.
 - Cap para bico Slip/ Lock: componente transparente ou adicionado de pigmento azul.
 - Cap para bico seringa enteral cateter: adicionado de pigmento azul.



2 INDICAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO

Utilizar para vedar o bico de seringas, equipos e conexões tipo macho (Luer slip e Luer lock) durante o manuseio, transporte e intervalos das administrações de medicações intermitentes.

3 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação. Não transportar junto com produtos tóxicos e químicos.


4 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

4.1 ADVERTÊNCIAS

- a) Antes da utilização do produto, o usuário deve verificar se o prazo de validade está vigente e se a embalagem primária do produto está íntegra. Caso o prazo de validade esteja expirado e ou a embalagem danificada, molhada, furada ou com outros problemas, o produto deverá ser descartado e comunicado a empresa para substituição e averiguações que se fizerem necessárias.
- c) Descartar os componentes do produto em coletor de resíduos de saúde apropriados após o uso.
- d) Este produto deve ser utilizado por profissionais de saúde qualificados e devidamente treinados.
- e) Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

4.2 PRECAUÇÕES

- a) Ler estas instruções antes de utilizar o produto.
- b) Todos os procedimentos devem ser realizados tomando precauções contra contato com sangue e fluidos corporais do paciente.

 <p>SALDANHA RODRIGUES LTDA. Qualidade e tecnologia em suas mãos.</p>	Ficha Técnica do Produto	Documento Nº: FTP-060
	CAP (TAMPAS)	Revisão Nº: 02
		Data: 16 Abr. 2020
		Pág.: 2 de 2

- c) Inspecionar o produto cuidadosamente antes do uso e não utilizar o produto se qualquer anormalidade for detectada.
d) Interromper o uso do produto se perceber qualquer anormalidade.

5 CONTRAINDICAÇÕES

Produto para saúde sem contraindicação, desde que utilizado conforme recomendado pelo fabricante.

6 APRESENTAÇÃO COMERCIAL

6.1 CAP UNIVERSAL ESTÉRIL

Apresentação	Embalagem	Quantidade
Cap Universal Estéril	Blister	1
	Caixa	1.000
Cap Universal Estéril In Bulk	Blister	150
	Caixa	4.500

- a) Embalagem individual “blister”: é constituída de filme termoplástico e papel grau cirúrgico permitindo a abertura com técnica asséptica.
b) Embalagem de transporte “caixa”: é constituída de papelão ondulado na cor parda, própria para embarque. A caixa padrão de embalagem é lacrada com fita adesiva transparente.

6.2 CAP UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL

Apresentação	Embalagem	Quantidade
Cap Universal In Bulk Transparente	Saco plástico	500
	Caixa	4.500
Cap Universal In Bulk Azul	Saco plástico	500
	Caixa	4.500

- a) Embalagem coletiva “saco plástico personalizado”: a embalagem é constituída de resina em polietileno, os produtos são acomodados de forma in bulk dentro da embalagem plástica.
b) Embalagem de transporte “caixa”: é constituída de papelão ondulado na cor parda, própria para embarque. A caixa padrão de embalagem é lacrada com fita adesiva transparente.

7 FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.

Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores

CEP: 69058-830 – Manaus-AM, Brasil

CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Inscrição Estadual: 06.200.183-3 / Inscrição Suframa: 20068301-2

Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416 E-mail: vendas@seringasr.com.br

Central de Relacionamento com o Cliente: qualidade@seringasr.com.br