

## Instrucciones de uso

Instrucciones de uso del “protector automático” para Conexiones en el pico de las jeringas y agujas

Protector automático + jeringa hipodérmica



Conexión en el pico **luer lock**  
 Encaje el protector en la parte externa del pico de la jeringa **luer lock**. Este procedimiento debe ser realizado antes de conectar la aguja al pico de la jeringa.

Protector automático + aguja hipodérmica



Conexión en el pico **luer slip**  
 Encaje el protector en forma de “u” en la base de la aguja hasta que ocurra el click indicando que hubo la traba. Este procedimiento puede ser realizado antes o después de conectar la aguja en la jeringa.


### Instrucciones de uso para conexión de la aguja en el pico *luer slip*



Sujete la aguja con firmeza por el protector y encaje en el pico de la jeringa.



Gire el protector con la aguja en el sentido horario para que ocurra una conexión segura.

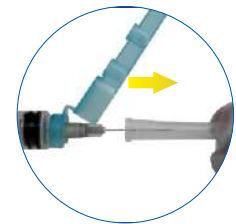

Retire el protector con un movimiento recto en el sentido opuesto de la jeringa.

### Instrucciones de uso para utilización del EPIFLEX



1

Ataje el EPIFLEX en la base antiderrapante, elija el orificio que mejor se acople al protector de la aguja y empuje el epiflex hasta prender el protector de la aguja.



2

Después de acoplar, retire el protector de la aguja con un movimiento recto y para frente. Prenda el EPIFLEX en el chaleco o simplemente lo suelte si esta preso al cuello por un cordón elástico.



3

Después de utilizar la aguja, ataje el EPIFLEX en la base antiderrapante y proteja la aguja con el protector hasta escuchar un “click” que indica que está trabado y no ofrece más riesgo.



4

Para desechar la aguja y la jeringa, apoye la punta del protector en una superficie rígida, presione el EPIFLEX para abajo, de modo que deslice por el protector y quede suelto. Deseche el material en local apropiado.