

# SR<sup>®</sup>

PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A  
Salud con Responsabilidad

## SERINGA PARA ACID GEL SEM AGULHA

Ficha Técnica de Produto  
FTP-013.000 - Rev.00 - 08/08/2023

### 01. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

3ml Luer Lock  
com 2 pçs



3ml Luer Lock  
com 3 pçs



NOME TÉCNICO	MS ANVISA	NCM DO PRODUTO	VALIDADE
Seringa 3ml Acid Gel sem agulha	Não Aplicável	90183119	05 ANOS com a embalagem primária intacta

- Produto de uso único atóxica não estéril.
- Produto fornecido com tampa (hub) fechado ou tampa lock, ou sem tampa.
- Bico Luer Lock projetado para garantir conexões precisas e sem vazamento.
- Cilindro transparente.
- Sem escala volumétrica.
- Cilindro com a inscrição acid gel e demais inscrições.
- Pistão injetado em borracha termoplástica isento de látex e siliconizado.
- Fabricada em ambiente 100% controlado, seguindo as normas de BPF – Boas Práticas de Fabricação e com as últimas tecnologias disponíveis no mercado internacional.


Tampa (Hub) fechado  
com 2 pçs



Tampa Lock (opcional)  
com 3 pçs



### 02. COMPOSIÇÃO DA SERINGA COM 3 PÇS

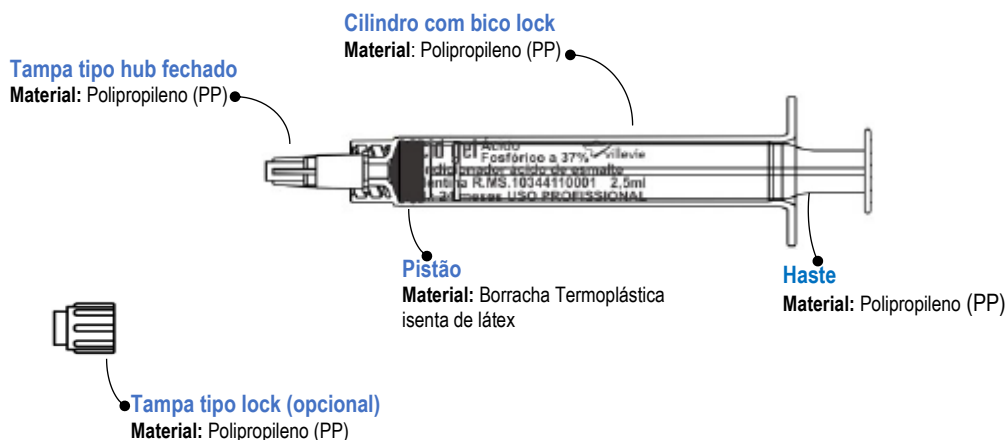


DEHP-FREE  
BPA-FREE  
LATEX-FREE  
PVC-FREE

Bico  
Luer Lock



### 03. COMPOSIÇÃO DA SERINGA COM 2 PÇS

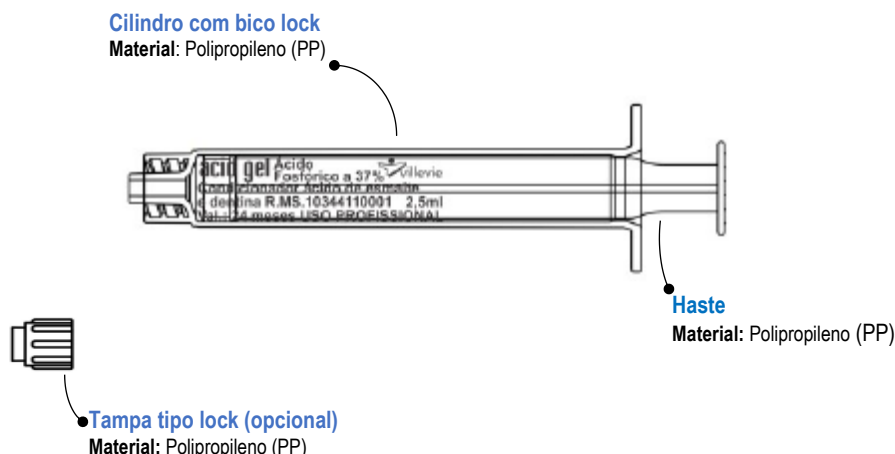

DEHP-FREE  
BPA-FREE  
LATEX-FREE  
PVC-FREE

Bico  
Luer Lock



### 04. MODELOS DISPONÍVEIS E APRESENTAÇÃO

As seringas são comercializadas no formato *in bulk* (a granel), não esterilizadas, embaladas em saco plástico com 800pçs. e dispostas em seguida em caixa de embalagem secundária de transporte, nas quantidades descritas na tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND. P/ CAIXA TRANSPORTE	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	COD. BARRAS EMBALAGEM TRANSPORTE
03065	SER 3ml LL S/AG 3 PÇS C/GRAVAÇÃO ACID GEL C/TAMPA - GRANEL	800	7842826 03065 5	1 7842826 03065 2
03066	SER 3ml LL S/AG 2 PÇS C/GRAVAÇÃO ACID GEL - GRANEL	800	7842826 03066 2	1 7842826 03066 9

## 05. INSTRUÇÕES DE USO E OUTRAS INFORMAÇÕES

### 4.1 INDICAÇÃO DE USO:

Uso profissional odontológico em aplicação de condicionador ácido de esmalte e dentina.

### 4.2 INSTRUÇÃO DE USO:

1. Verificar a integridade e a validade do produto antes do uso;
2. Trava da seringa: Observar que existe um espaço entre o êmbolo e a base do bico da seringa. Pressionar o êmbolo levemente simulando uma aplicação para ocorrer o destravamento da seringa;
3. Realizar o procedimento conforme técnica adequada;
4. Após o uso descartar em local adequado para perfurocortantes.

### 4.3 CONTRAINDICAÇÕES

Produto para saúde sem contraindicação, desde que utilizado conforme recomendado pelo fabricante.

### 4.4 PRECAUÇÕES

- a) Ler estas instruções antes de utilizar o produto;
- b) Inspeccionar o produto cuidadosamente antes do uso, e não utilizar o produto se qualquer anormalidade for detectada;
- c) Não usar o produto para outro propósito, que não seja para o indicado;
- d) Interromper o uso do produto se perceber qualquer anormalidade.

### 4.5 ADVERTÊNCIAS

- a) Antes da utilização do produto o usuário deve verificar se está vigente o prazo de validade e a se está íntegra a embalagem primária (em saco plástico) do produto. Caso o prazo de validade esteja expirado e ou a embalagem danificada, molhada, furada ou com outros problemas, o produto deverá ser descartado e comunicado a empresa para substituições e averiguações que se fizerem necessárias.
- b) Descartar os componentes do produto em coletor de resíduos de saúde apropriados.
- c) Este produto deve ser utilizado por profissionais de saúde qualificados e por pessoas treinadas.
- d) Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

## 06. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Este produto não se submete ao processo de esterilização

## 07. CONFORMIDADE DO PRODUTO

Produto fabricado conforme requisito regulatórios abaixo:

- NBR ISO 9001:2015
- NBR ISO 13485:2016
- NBR ISO 7886-1:2020
- NBR ISO 80369-7:2022

## 08. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem.
- Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação.

## 09. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor com os cuidados necessários para que o produto permaneça íntegro.

### 10. DETALHES E SIMBOLOS NAS EMBALAGENS DE TRANSPORTE

#### NA EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE TRANSPORTE

SIMBOLO	LEGENDA	SIMBOLO	LEGENDA	SIMBOLO	LEGENDA
	Manter em local seco	 PRODUTO DE USO ÚNICO	Produto de Uso Único	 XX =	Empilhamento máximo
	Manter afastado da luz solar		Produto Frágil		

### 11. INFORMAÇÕES COMERCIAIS

	+55 67 4063-9707 (Brasil)		ventas@jeringasr.com.py
	+595 336 271844 (Paraguai)		atendimento@jeringasr.com.py
	www.jeringasr.com.py		Calle Saldanha Rodrigues N° 1855 – Ruta V – Km 3 Pedro Juan Caballero – Dpto. Amambay - Paraguay