


01. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



NOME TÉCNICO	MS ANVISA	NCM DO PRODUTO	VALIDADE
Seringa 3ml Negra de uso único com 3 pçs sem agulha para clareadores	Não Aplicável	90183119	05 ANOS com a embalagem primária intacta

- Produto de uso único atóxica não estéril.
- Produto fornecido com tampa (hub) fechado ou tampa lock, ou sem tampa.
- Bico Luer Lock projetado para garantir conexões precisas e sem vazamento.
- Cilindro negro totalmente opaco.
- Sem escala volumétrica.
- Pistão injetado em borracha termoplástica isento de látex e siliconizado.
- Fabricada em ambiente 100% controlado, seguindo as normas de BPF – Boas Práticas de Fabricação e com as últimas tecnologias disponíveis no mercado internacional.

02. COMPOSIÇÃO DA SERINGA

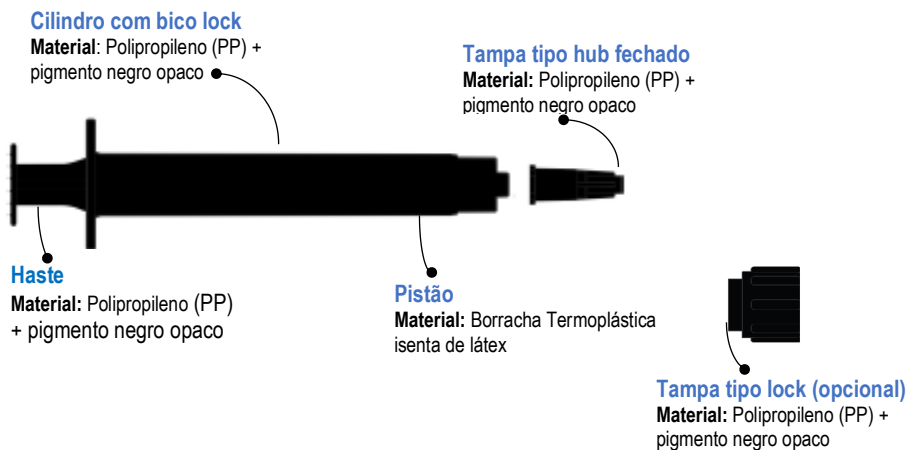

03. MODELOS DISPONÍVEIS E APRESENTAÇÃO

As seringas são comercializadas no formato *in bulk* (a granel), não esterilizadas, embaladas em saco plástico com 800pçs. e dispostas em seguida em caixa de embalagem secundária de transporte, nas quantidades descritas na tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND. P/ CAIXA TRANSPORTE	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	COD. BARRAS EMBALAGEM TRANSPORTE
03062	SER 3ml LL S/AG 3 PÇS NEGRA C/TAMPA - GRANEL	800	7842826 03062 4	1 7842826 03062 1
03063	SER 3ml LL S/AG 3 PÇS NEGRA S/TAMPA - GRANEL	800	7842826 03063 1	1 7842826 03063 8

04. INSTRUÇÕES DE USO E OUTRAS INFORMAÇÕES

4.1 INDICAÇÃO DE USO:

Uso odontológico em aplicação de clareadores.

4.2 INSTRUÇÃO DE USO:

1. Verificar a integridade e a validade do produto antes do uso;
2. Trava da seringa: Observar que existe um espaço entre o êmbolo e a base do bico da seringa. Pressionar o êmbolo levemente simulando uma aplicação para ocorrer o destravamento da seringa;
3. Realizar o procedimento conforme técnica adequada;
4. Após o uso descartar em local adequado para perfurocortantes.

4.3 CONTRAINDICAÇÕES

Produto para saúde sem contraindicação, desde que utilizado conforme recomendado pelo fabricante.

4.4 PRECAUÇÕES

- a) Ler estas instruções antes de utilizar o produto;
- b) Inspeccionar o produto cuidadosamente antes do uso, e não utilizar o produto se qualquer anormalidade for detectada;
- c) Não usar o produto para outro propósito, que não seja para o indicado;
- d) Interromper o uso do produto se perceber qualquer anormalidade.

4.5 ADVERTÊNCIAS

- a) Antes da utilização do produto o usuário deve verificar se está vigente o prazo de validade e a se está íntegra a embalagem primária (em saco plástico) do produto. Caso o prazo de validade esteja expirado e ou a embalagem danificada, molhada, furada ou com outros problemas, o produto deverá ser descartado e comunicado a empresa para substituições e averiguações que se fizerem necessárias.
- b) Descartar os componentes do produto em coletor de resíduos de saúde apropriados.
- c) Este produto deve ser utilizado por profissionais de saúde qualificados e por pessoas treinadas.
- d) Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

05. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Este produto não se submete ao processo de esterilização

06. CONFORMIDADE DO PRODUTO

Produto fabricado conforme requisito regulatórios abaixo:

- NBR ISO 9001:2015
- NBR ISO 13485:2016
- NBR ISO 7886-1:2020
- NBR ISO 80369-7:2022

07. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem.
- Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação.

08. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor com os cuidados necessários para que o produto permaneça íntegro.

09. DETALHES E SIMBOLOS NAS EMBALAGENS DE TRANSPORTE

NA EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE TRANSPORTE

SIMBOLO	LEGENDA	SIMBOLO	LEGENDA	SIMBOLO	LEGENDA
	Manter em local seco	 PRODUTO DE USO ÚNICO	Produto de Uso Único		Empilhamento máximo
	Manter afastado da luz solar		Produto Frágil		

10. INFORMAÇÕES COMERCIAIS

	+55 67 4063-9707 (Brasil)		ventas@jeringasr.com.py
	+595 336 271844 (Paraguai)		atendimento@jeringasr.com.py
	www.jeringasr.com.py		Calle Saldanha Rodrigues N° 1855 – Ruta V – Km 3 Pedro Juan Caballero – Dpto. Amambay - Paraguay